

## Важна информация

Прочетете тази листовка, преди да отворите опаковката опаковка и да започнете теста.

Не отваряйте алуминиевата опаковка, докато не сте готови да направите теста.

Този тест е изключително чувствителен, като открива човешки хорион гонадотропин (hCG) в урината Ви в концентрации поне 5 IU / L. Той Ви предоставя информация за възникната бременност във възможно най-ранен етап и може да се използа дори преди да е настъпило закъснението на месечния Ви цикъл (т.е. около 8 дни след зачеването).

**Препоръчително е да извършите теста с първа сутрешна урина, тъй като тогава нивата на хормона на бременността hCG са най-високи.**



**Компоненти на теста:** Инструкции за употреба, 2 тестови касети - всяка в самостоятелна опаковка от фолио с влагоуловител. За да извършите теста, в допълнение ще се нуждате от: таймер и чист контейнер за пробата урина, по Ваше желание.

**Моля обрънете внимание:** Използваните тестови материали (напр.антитела) са потенциално инфекционни, но не представляват рисък за здравето, при условие че всички компоненти на теста се използват в съответствие с тези инструкции.

CE маркировка - този продукт отговаря на изискванията, заложени в директива 98/79/ЕС на ЕП и ЕС от 27 Октомври 1998 година за ин-витро диагностични медицински устройства. Процедура по съответствие е проведена от известния орган (0483). Клас В ин-витро диагностични медицински устройства спрямо регулация ЕС 2017/746, Анекс VIII.

Прочетете инструкциите ② Не употребявайте повторно [inv] Ин-витро диагностично устройство [lot] Партида [exp] Срок на годност [prod] Производител [ref] Каталожен номер ↓ Съхранявайте при.

Дръжте далеч от деца. Не разрушавайте теста. Само за външна употреба. Съхранявайте при температура от 4 до 30 градуса. Инвирто диагностично медицинско изделие за самотестване.



**Супер ранен  
тест за бременност  
от 8мия ден**

## Методи за извършване на теста

### Директно



Дръжте теста под лека струя урина за около 3 секунди.

### С чаша



Потопете теста в контейнер, пълен с проба, за около 3 секунди като наблюдавате **границата на потапяне**.

Оставете теста върху алуминиевата опаковка и отчетете резултата си след **10-15 минути**, като направите справка с гърба на кутията.

# Интерпретация на резултатите



Ако има само **една лилава линия** в горната част на прозореца за резултати, това означава, че тестът е извършен правилно, но не е открит hCG. Можете да приемете, че не сте бременна. Можете да повторите теста след няколко дни.

Ако менструацията Ви закъсне с повече от една седмица, препоръчваме Ви да посетите Вашия лекар. Ако цикълът Ви е закъснял, все още има вероятност да сте бременна и трябва да избягвате потенциални рискове за ембриона като рентгенови изследвания или злоупотреба с алкохол.



Ако **две лилави линии** се появят в прозореца за резултати, то hCG е открит. Можете да приемете, че сте **бременна**, дори ако долната е много бледа. Бледа тест линия може да показва ранен етап на бременността.

Препоръчваме да посетите лекаря си най-късно в първия ден на закъснението на цикъла Ви. Грижите преди раждането са важни! Избягвайте потенциални рискове за ембриона, като рентгенови изследвания или злоупотреба с алкохол.

Ако резултатът от теста Ви е положителен, но цикълът Ви все още не е закъснял, препоръчваме Ви да извършите друг тест за бременност или ранен тест за бременност след няколко дни, за да потвърдите резултата.

**Допълнителна информация за резултата от теста може да бъде намерена в следващата колона.**

Тестът се счита за невалиден, ако полето за резултат не показва лилава линия след 15-20 минути или ако се появи само тестовата линия. Изключително рядко се получава невалиден резултат. Възможните причини за невалиден резултат могат да се дължат на повредена фолиева опаковка, неправилно съхранение или грешки, допуснати при използване на теста, например недостатъчно количество урина. Ако получите невалиден резултат, запазете всички тестови компоненти и се свържете с производителя на теста.

**Не считайте за достоверен резултат на тест, оставен за повече от 20 минути.**

**Не вземайте важни от медицинска гледна точка решения без Вашия лекар!**

Изхвърлете теста и опаковъчния материал с нормалните си битови отпадъци, след като резултатите от теста Ви ще бъдат определени.

# Информация за резултата

По време на бременността Ви хормони като hCG, естроген и прогестерон позволяват на плода и бременността Ви да се развият нормално. Нивото на hCG в урината на здрава, небременна жена е под 3 IU/L (международн единици на литър). По време на бременността нивото на hCG се увеличава от първите няколко дни след зачеването и достига стойности от около 230 000 IU/L до 10-та седмица от бременността.

Този тест дава индикация за бременност, ако урината Ви съдържа поне 5 IU hCG /L. Макар и изключително рядко, както при повечето медицински тестове, може да се получат фалшиви резултати.

Причини за фалшиво **отрицателен** резултат от теста:

- Стойностите на hCG могат да се увеличават различно в отделните случаи и по този начин може да е твърде ниска, за да бъде открита в много ранните етапи на бременността.
- Ако урината Ви е много разредена, резултатът от теста може да покаже отрицателен резултат.

Причини за фалшиво **положителен** резултат от теста - когато Вашият лекар потвърди, че не сте бременна:

- Значителен брой бременностни се провалят, особено през първите четири седмици. Това може да създаде подвеждащ резултат.
- Тестът не може да направи разлика между нормална и извънматочна бременност. И в двата случая могат да се получат положителни резултати от теста.
- При небременни жени нивата на hCG достигат върх в средата на менструалния цикъл и могат да бъдат близо до границата на откриване на този тест при много редки случаи.
- Някои тумори произвеждат hCG („фантомен hCG“) и могат да имитират бременност.
- Лечението на бесплодие винаги включва инжекции с hCG, които биха могли да доведат до повишени нива на hCG в урината и по този начин да повлият на тестовия резултат.

Жените близо до менопауза произвеждат повишени нива на hCG. Въпреки това, количествата hCG обикновено са под границата на откриване на този тест.

Лекарствата или заболяванията, например трофобластната болест, могат да повлият нивата на hCG и могат също да доведат до неправилен резултат. Противозачатъчните таблетки обаче не влияят по никакъв начин на резултата от теста.